


## ColoAlert - Test zur Darmkrebsfrüherkennung im Stuhl (H205)



### Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen
- 1 x Testanleitung
- 1 x Stuhlfänger
- 1 x Stuhlröhrchen für Genanalyse
- 2 x Stuhlröhrchen für Okkultbluttest
- 3 x Transportumröhrchen
- 3 x Namensetikett

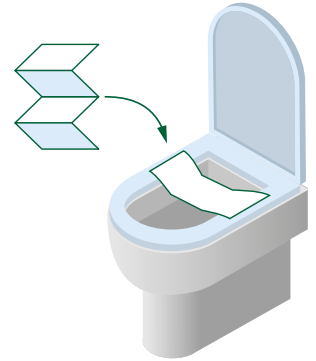

Um eine hohe diagnostische Sicherheit der Stuhluntersuchung zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Punkte bei der Probenentnahme:

- Bitte verwenden Sie zur Stuhlgewinnung aller Röhrchen den beiliegenden Stuhlfänger. Der Stuhl sollte nicht mit dem Toilettenbecken oder Wasser in Berührung kommen.



### 1. Stuhlprobengewinnung für Genanalyse

- Bitte schrauben Sie das längere **Stuhlröhrchen mit dem braunen Deckel** auf. Entnehmen Sie mit dem Löffel an drei verschiedenen Stellen des Stuhls **maximal insgesamt eine erbsengroße Menge Stuhl**.



**Achtung:** Bitte Flüssigkeit nicht ausschütten! Häufigster Fehler ist die Überfüllung des Röhrchens. Die Probengröße sollte etwa erbsengroß sein und die Größe des Löffels NICHT überschreiten! Eine Überfüllung führt zur Ablehnung des Tests und erfordert eine erneute Probenahme!

- Schrauben Sie den Löffel wieder auf das Stuhlröhrchen. **Schütteln** Sie das **Stuhlröhrchen** für mindestens eine Minute, bis sich die Stuhlprobe gleichmäßig mit dem Reagenz vermischt hat.

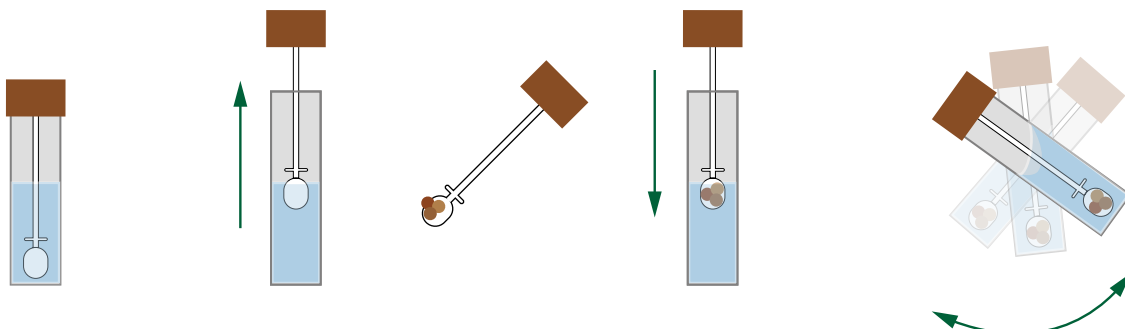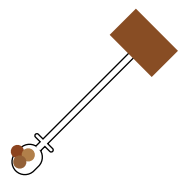

## 2. Stuhlprobengewinnung für Okkultbluttest

### 1. Dosierstab herausziehen

Das Stuhlprobenröhrchen am **blauen Konuseinsatz** festhalten (**der blaue Konuseinsatz bleibt verschlossen auf dem Stuhlprobenröhrchen**). Dann den **gelben Dosierstab** aufdrehen und herausziehen. **Die Flüssigkeit nicht aus dem Stuhlprobenröhrchen auskippen!**

### 2. Stuhlprobe aufnehmen

Mit dem Dosierstab **3-mal** an verschiedenen Stellen einer Stuhlprobe einstechen. Die Rillen der Dosierspitze müssen sich dabei mit Stuhlprobe füllen.


### 3. Dosierstab zurückführen

Den Dosierstab mit der daran anhaftenden Stuhlprobe **einmal** zurück in das Stuhlprobenröhrchen stecken und **nicht wieder** herausziehen. Der überschüssige Stuhl wird dabei an der engen Öffnung des blauen Konuseinsatzes abgestreift. **Bitte beachten:** es darf nur diese kleine, definierte Stuhlmenge am Dosierstab in das Stuhlprobenröhrcheninnere gelangen.

### 4. Stuhlprobenröhrchen zudrehen

Dann drehen Sie den Dosierstab so zu, dass der Klickverschluss hörbar einrastet.

**Bitte beachten:** Die **Stuhllösung** im Stuhlprobenröhrcheninneren **verfärbt sich nahezu gar nicht**. Wenn Sie allerdings mehr als einmal den Dosierstab in das Stuhlprobenröhrcheninnere einbringen, verfärbt sich bedingt durch zu viel Stuhl die Stuhllösung braun, was dazu führt, dass **Ihre Probe nicht mehr gemessen werden kann bzw. Sie ein falsch positives Ergebnis erhalten werden!**

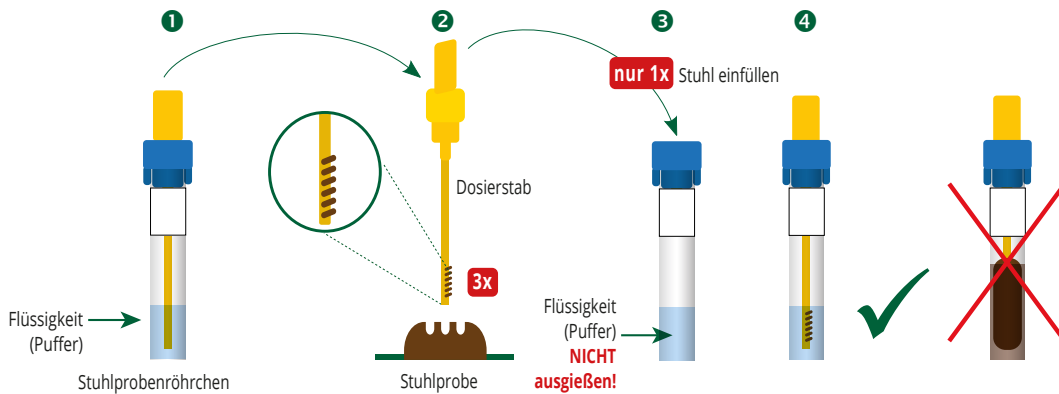

## Probenversand

**Bitte Probengefäße unbedingt mit beiliegenden Namensetiketten beschriften:**

- **Namen**
- **Abnahmedatum**
- **Uhrzeit**

Die beschrifteten Stuhlprobenröhrchen in die beiliegenden Transportumröhrchen stecken und sicher verschließen. Anschließend alle Umröhrchen und den ausgefüllten Anforderungsbogen in den Rückumschlag verpacken und bevorzugt in einer Postfiliale abgeben.



**Wichtiger Hinweis:** Bitte nicht am Freitag (Wochenende) oder vor Feiertagen versenden!!!